


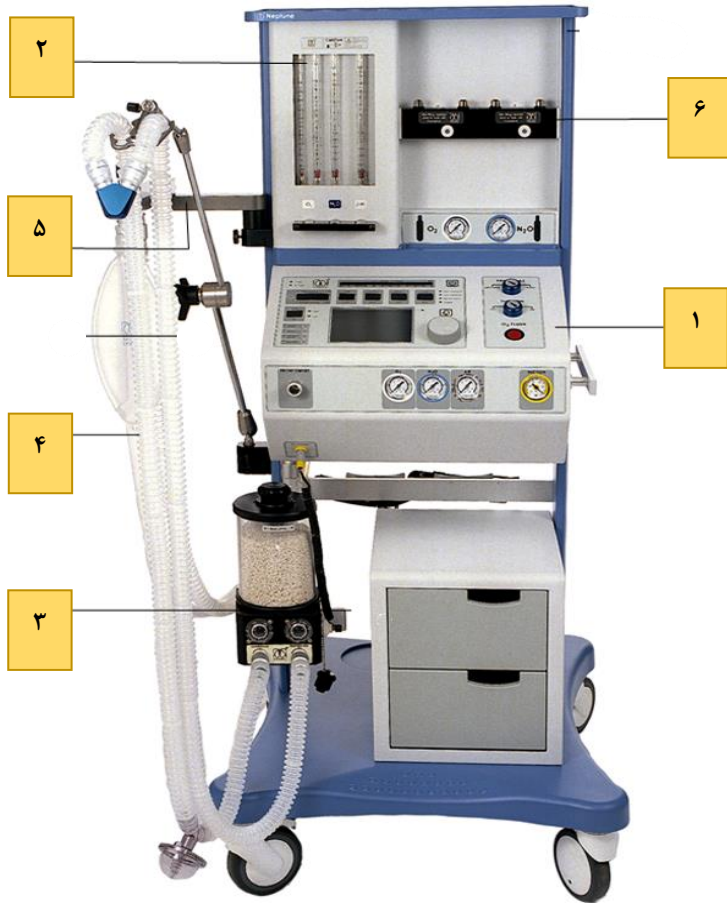

نمای روبه روی دستگاه :

۱- ونتیلاتور دستگاه

۲- فلومتر

۳- Absorber

۴- ست تنفسی

۵- بازوی منوال

۶- محل قرارگیری Vaporizer



پشت دستگاه :

۱- کانکتور اکسیژن مرکزی

۲- کانکتور N2O مرکزی

۳- کانکتور هوای فشرده مرکزی

۴- ورودی خلاء (Optional)

۵- اگزوز ونتیلاتور (به بیرون بیمارستان هدایت شود)

۶- کانکتور کپسول N2O

۷- کانکتور کپسول اکسیژن

۸- GASOVAC (Optional)

۹- Suction Jar (Optional)

۱۰- خروجی Fresh gas (اتصال به پشت Absorber)

۱۱- واتر ترپ و فیلتر هوا


۱۲- کلید Driving gas (در صورت عدم استفاده از Air مرکزی روی حالت O2 قرار گیرد)

۱۳- کلید روشن/خاموش کردن دستگاه و محل اتصال کابل برق (حتما با بست مشکی رنگ مهار شود)

اتصالات دیگر قسمت ها و سنسور اکسیژن را نیز مطابق شکل های زیر انجام دهید:



ونتیلاتور دستگاه :

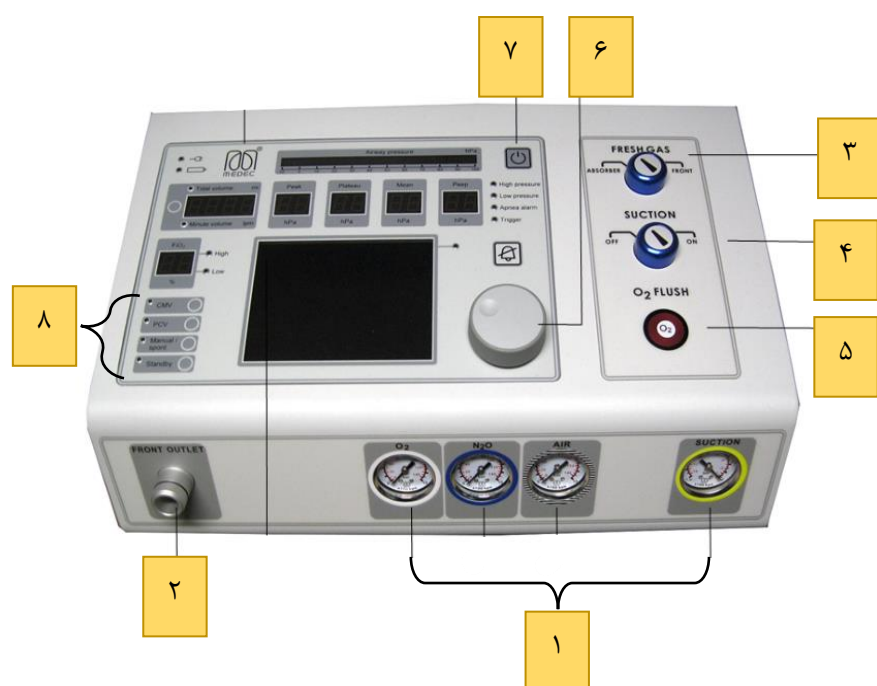

۱_ مانومتر گاز های ورودی و ساکشن

۲_ خروجی Front

۳_ کلید Front/Absorber

۴_ ناب ساکشن

۵_ کلید فشاری O2 Flush

۶_ کلید ناب (چرخاندن برای انتخاب و فشردن برای تایید)

۷_ کلید روشن/خاموش کردن دستگاه

۸_ مدهای تنفسی (با یک بار فشردن، تنظیمات مد روی نمایشگر نشان داده میشود

و با فشردن دوباره، تنفس دهی آغاز خواهد شد)

نحوه راه اندازی دستگاه :

۱_ کانکتور گاز های ورودی را متصل کنید. (فشار گاز ها حتما باید بین ۸-۳ بار تنظیم شود)

۲_ خروجی اگزوز ونتیلاتور و بازوی منوال را به بیرون هدایت کنید.

۳_ ست تنفسی را متصل کرده و از تنظیم دوز دارو روی Vaporizer اطمینان حاصل کنید.


۴_ دستگاه و ونتیلاتور را روشن کنید.

۵_ گاز های اکسیژن و N2O را مطابق دستور پزشک باز کنید. (دستگاه مجهز به سیستم ایمنی Cut off می باشد)


۶_ هردو تست نشتی دستگاه را مطابق شکل های ۲-۱ انجام دهید.

۷_ کالیبراسیون ۲۱ درصد و ۱۰۰ درصد سنسور اکسیژن را مطابق شکل ۳ انجام دهید. (هرگز از دستگاه با سنسور معیوب استفاده نشود)


۸_ دستگاه را با مد تنفسی انتخاب شده به بیمار متصل کنید.

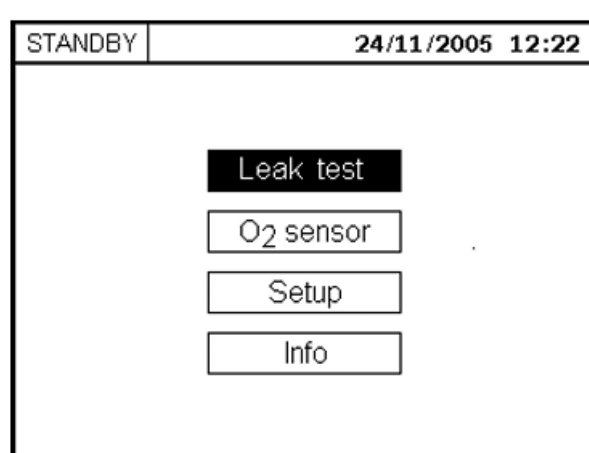

شکل-۱ گزینه لیک تست را برای تست های نشتی و گزینه O2 sensor را برای کالیبر کردن سنسور، با کلید ناب انتخاب کنید.

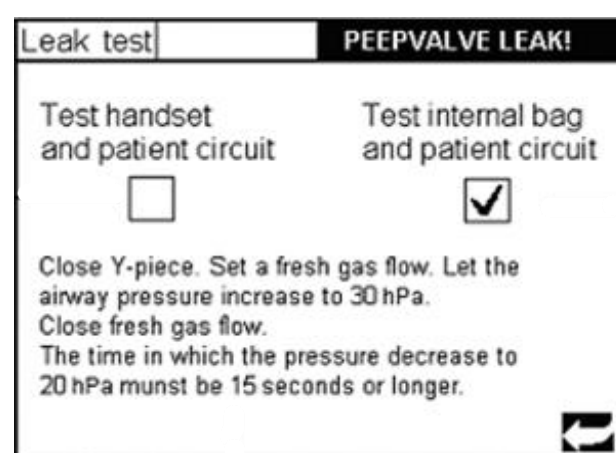

شکل-۲ روی هر تست به ترتیب کلیک کنید و دکمه O2 Flush را تا فشار کمتر از ۳۰ بار فشار دهید. (اگر فشار روی باروگراف افت نکرد به معنای عدم نشتی می باشد) توجه شود هنگام تست نشتی حتما سر Y piece را مسدود کرده و APL valve را ببندید.

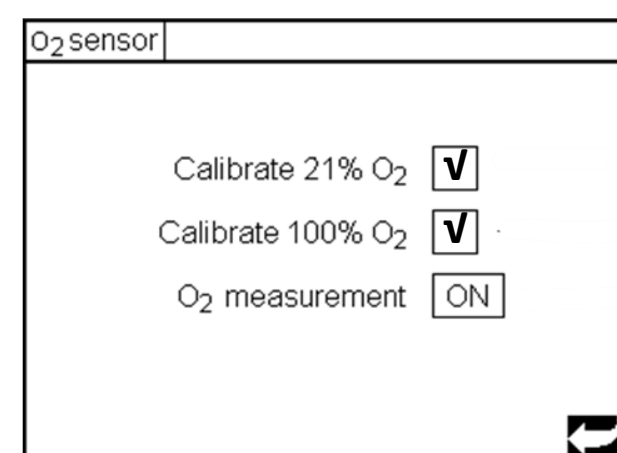

شکل-۳ هنگام کالیبر ۲۱٪ سنسور از محل Absorber باز شود و در معرض هوا قرار گیرد و هنگام کالیبر ۱۰۰٪ اکسیژن را به اندازه ۴ لیتر باز کنید و دقت کنید Y piece مسدود نباشد.

* این برگه فقط جهت کاربری سریع دستگاه می باشد، بدیهی است جهت اطلاعات تکمیلی به دفترچه دستگاه مراجعه شود.

تلفن تماس شعبه مرکزی : ۰۲۱-۲۲۲۵۰۵۵۵ (داخلی ۶۲۰-۶۰۰)

تلفن تماس ضروری : ۰۹۱۲۰۱۳۹۸۶۹

شرکت احیا درمان پیشرفته