





- نمای رو به روی دستگاه :

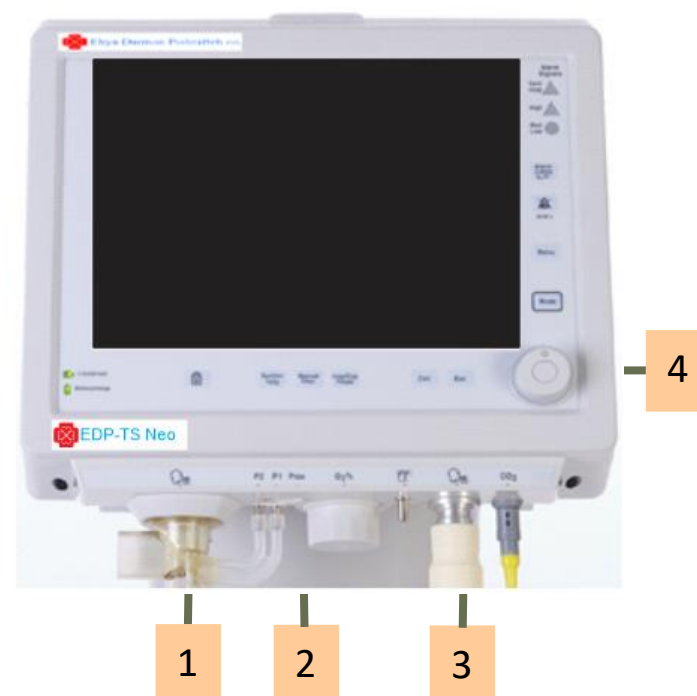

- پشت دستگاه :

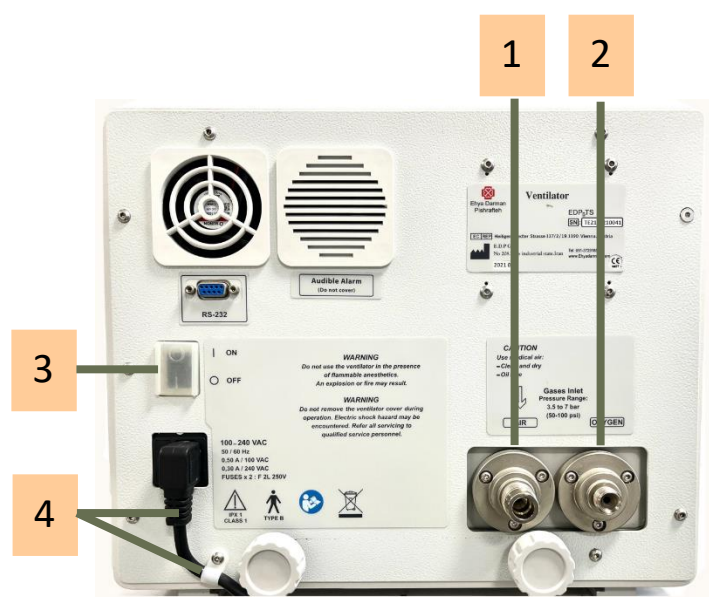


- ۱_ محل نصب فلوسنسور و ست تنفسی بازدمی
- ۲_ محل اتصال فلوسنسور پروگزیمال
- ۳_ کانکتور ست تنفسی دمی
- ۴_ کلید ناب (چرخش برای انتخاب و فشار برای تایید)


- ۱_ کانکتور هوای فشرده (واتر ترپ در مسیر ورودی قرار گیرد)
 - ۲_ کانکتور اکسیژن
 - ۳_ کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
 - ۴_ کابل برق (حتما توسط بست سفید رنگ مهار شده باشد)
- توجه شود فشار هوای فشرده و اکسیژن بین ۷-۳/۵ بار، تنظیم شود.

- نحوه راه اندازی و تست اولیه :


- ۱_ اتصال گازهای ورودی (اکسیژن و هوای فشرده)
- ۲_ اطمینان از اتصال کابل های برق (هد دستگاه، کمپرسور و رطوبت ساز)
- ۳_ اتصال **ست های تنفسی** متناسب با رنج سنی انتخاب شده به همراه فلوسنسور پروگزیمال
- ۴_ **روشن کردن** دستگاه و تست اولیه مطابق **شکل ۱-۳**

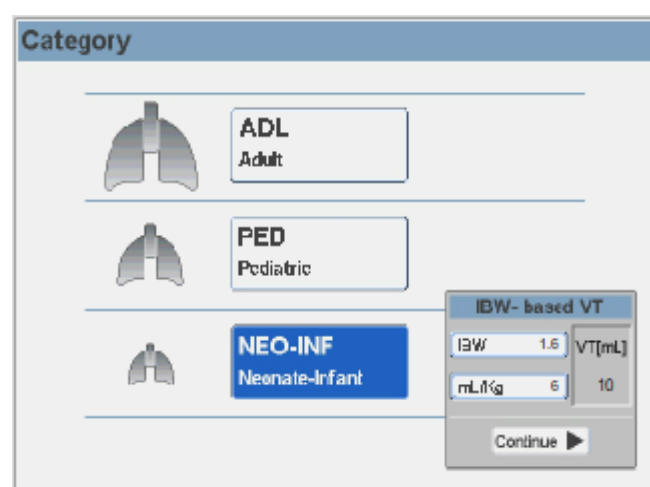

شکل ۱: انتخاب گروه سنی

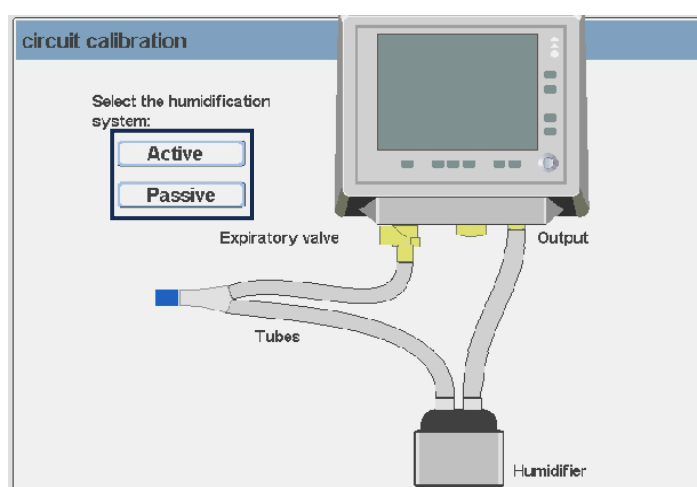

شکل ۲: انتخاب حالت Active
(استفاده از رطوبت ساز الزامی است)

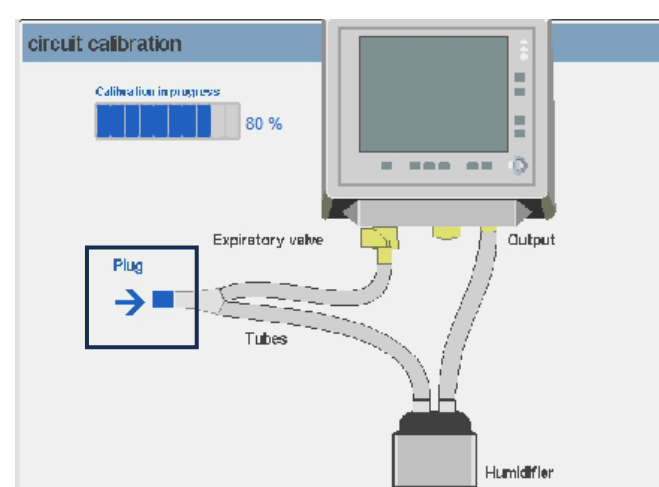


شکل ۳: تست و کالیبر اولیه

- نحوه راه اندازی و تست اولیه :

۵_ انتخاب **مد تنفسی** (مدهایی که در عنوان خود **TCPL** دارند، فلو ثابت هستند)

با چرخاندن و فشردن ناب (شکل ۴)

۶_ تنظیم **پارامترهای مربوط به بیمار** در نوار پایین صفحه (شکل ۵)

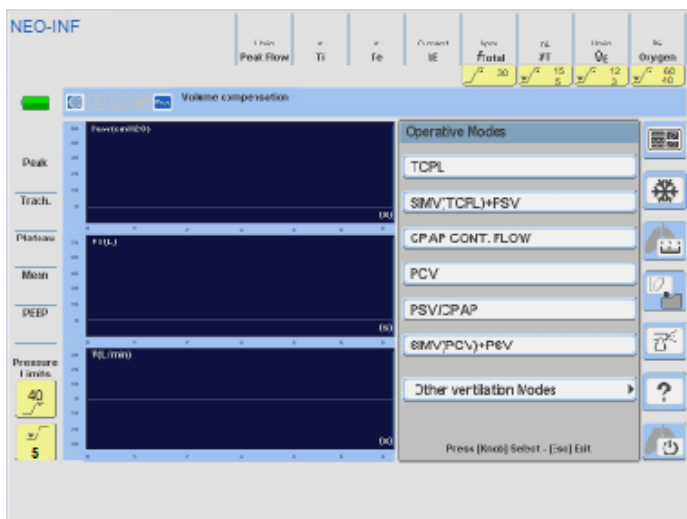


شکل ۴ : انتخاب مد تنفسی

شکل ۵ : پارامترهای تنظیم شده در مد تنفسی انتخابی

0.402 L VT	1.00 s Ti	1:9.0 :tE	6 bpm f	5 cmH2O PSV	25 % Exp. Sensitiv.	5 cmH2O PEEP	3.0 L/min Sens	50 % Oxygen	Rise Time	Flow Waveform
حجم جاری	زمان دم	نسبت زمانی	تعداد تنفس	فشار حمایتی	درصد حمایت	فشار بازدم	تریگر فلویی	درصد O2	موج تنفس	موج فلو

- پارامترهای دیگر در شکل زیر نشان داده شده است :

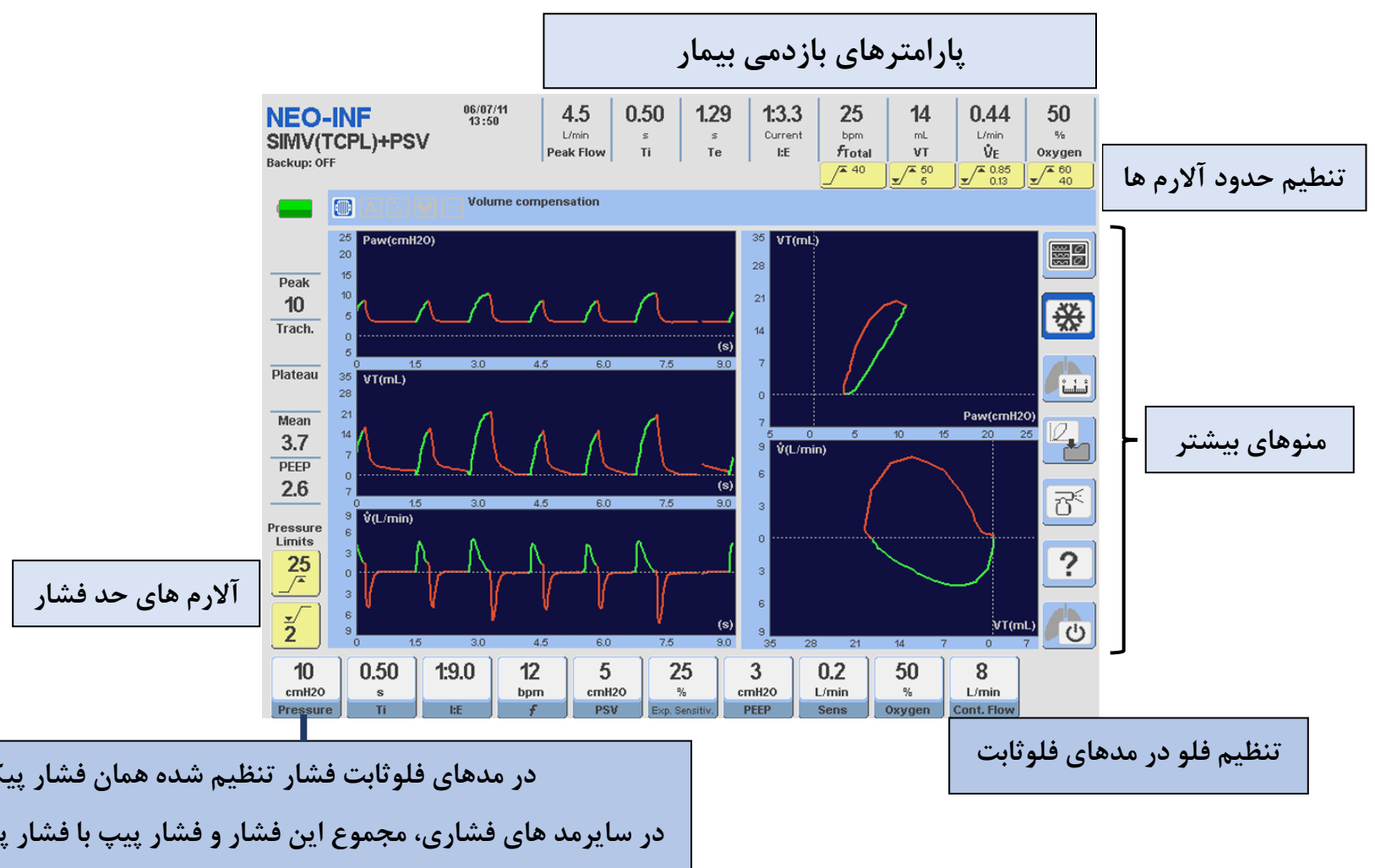

نکات مهم :

- * به هیچ عنوان از فیلتر HME استفاده نکنید. (Humidifier, یک عامل حیاتی برای تهویه نوزادان است).
- * بعد از اتصال فلوسنسور پروگزیمال آن را از مسیر Proximal → Flow sensor → Ventilatory Adjusts → Menu فعال کنید.
- * از تمیز بودن فیلتر ورودی پشت کمپرسور اطمینان حاصل کنید.
- * ولو بازدمی قابلیت ضد عفونی به مدت ۲۰ دقیقه در الکل ۷۰ درصد را دارد.
- * قبل از اتصال دستگاه به بیمار تست اولیه را انجام دهید تا از سالم بودن دستگاه و ست های تنفسی اطمینان حاصل شود.
- * این برگه فقط جهت کاربری سریع دستگاه می باشد، بدیهی است جهت اطلاعات تکمیلی به دفترچه دستگاه مراجعه شود.

تلفن تماس شعبه مرکزی : ۰۲۱-۲۲۲۵۰۵۵۵ (داخلی ۶۲۰-۶۰۰)

تلفن تماس ضروری : ۰۹۱۲۰۱۳۹۸۶۹

شرکت احیا درمان پیشرفته