





- نمای رو به روی دستگاه :

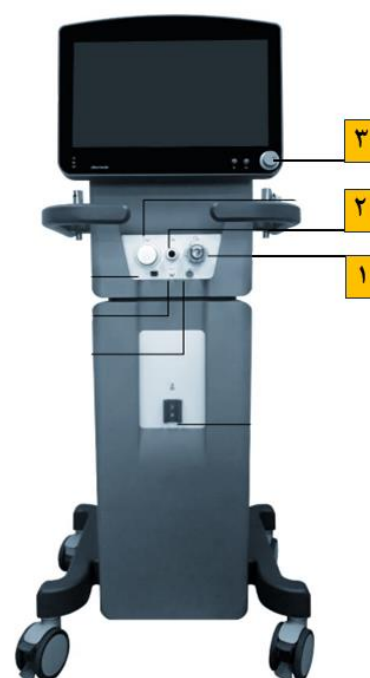

- پشت دستگاه :

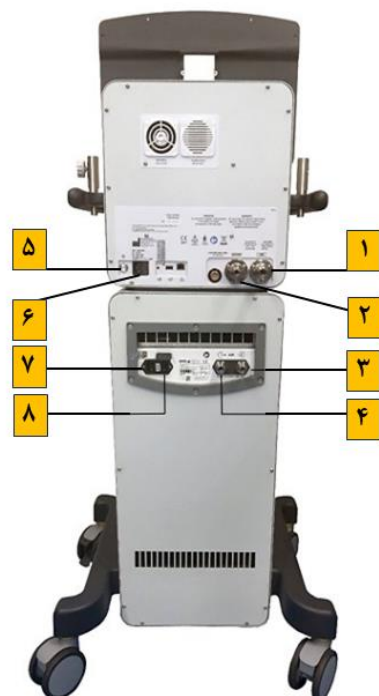

- ۱- محل نصب فلوسنسور بازدمی و ست تنفسی (بازدم)
- ۲- کانکتور ست تنفسی (دم)
- ۳- کلید ناب (چرخش برای انتخاب و فشار برای تایید)

- ۱- ورودی هوای فشرده (واتر ترپ در مسیر ورودی قرار گیرد)
- ۲- ورودی اکسیژن
- ۳- خروجی هوای فشرده کمپرسور
- ۴- ورودی هوای فشرده مرکزی
- ۵- کلید روشن کردن ونتیلاتور
- ۶- کابل برق ونتیلاتور
- ۷- کلید on/off کمپرسور
- ۸- کابل برق کمپرسور (کابل های برق با بست مهار شوند)

توجه شود فشار هوای فشرده و اکسیژن بین ۷-۳/۵ بار، تنظیم شود.

- نحوه راه اندازی و تست اولیه :

- ۱- اتصال گازهای ورودی (اکسیژن و هوای فشرده)

- ۲- اطمینان از اتصال کابل های برق (هد دستگاه، کمپرسور و رطوبت ساز)

- ۳- اتصال **ست های تنفسی** متناسب با رنج سنی انتخاب شده

- ۴- **روشن کردن** دستگاه و تست اولیه مطابق **شکل ۱**



شکل ۱

- نحوه راه اندازی و تست اولیه :

۵_ تنظیم پارامترهای مربوط به بیمار در بخش پارامترها در نوار پایین صفحه (شکل ۵)

Mode VSIMV + PSV	V _r 0.320 L	PS 5 cmH ₂ O	F 12 bpm	T _i 1.68 s	I:E 1:2.0	Exp. Trig. 25 %	Flow Shape 	Rise Time 0.15 s	PEEP 5 cmH ₂ O	Insp. Trig. 3.0 L/min Flow	O ₂ 50 %
مد تنفسی	حجم جاری	فشار حمایتی	تعداد تنفس	زمان دم	نسبت زمانی	درصد حمایت	شکل موج فلو	زمان خیز	فشار PEEP	تریگر فلوئی	درصد O2

شکل ۵ : پارامترهای تنظیم شده در مد تنفسی انتخابی

- بخش مانیتورینگ بیمار (با لمس هر بخش در نوار پایین صفحه می توان به پارامترهای آن بخش دسترسی پیدا کرد):



نکات مهم :

- * به هیچ عنوان به صورت همزمان از فیلتر HME و Humidifier استفاده نکنید.
- * بهترین محل اتصال فیلتر HME در ورودی Y Piece است.
- * ولو بازدمی قابلیت ضد عفونی به مدت ۲۰ دقیقه در الکل ۷۰ درصد را دارد.
- * قبل از اتصال دستگاه به بیمار تست اولیه را انجام دهید تا از سالم بودن دستگاه و ست های تنفسی اطمینان حاصل شود.
- * این برگه فقط جهت کاربری سریع دستگاه می باشد، بدیهی است جهت اطلاعات تکمیلی به دفترچه دستگاه مراجعه شود.

تلفن تماس شعبه مرکزی : ۰۲۱-۲۲۲۵۰۵۵۵ (داخلی ۶۲۰-۶۰۰)

تلفن تماس ضروری : ۰۹۱۲۰۱۳۹۸۶۹

شرکت احیا درمان پیشرفته